

stop hémo



STERIL, BLODSTILLANDE OCH SÅRLÄKANDE VADD

Smärtfri, blodstillande och sårläkande behandling vid mindre blödningar/sår hos vuxna och barn. Kan användas vid graviditet samt vid blödningsrubbnings, medfödda eller på grund av vitamin K-antagonist eller heparinbehandlingar.

BLODSTILLANDE	SÅRLÄKANDE
<ul style="list-style-type: none">• Näsblod (Epistaxis)• Lokal blödning (skärsår, skrubbsår, sticksår)• Blödning i munnen, läppar tandkött och tunga• Tandutdragningar	<ul style="list-style-type: none">• Ytliga sår $\leq 8 \text{ cm}^2$• Kirurgiska sår• Traumatiska sår som skrubbsår, skärsår, rispör öppna blåsor, ytliga brännskador

INNEHÅLL OCH VERKAN

Stop Hémo innehåller fibrer från kalciumalginat framställt från havstång. Vid kontakt med blod frigörs kalciumjoner, vilket påskyndar koagulation och sårläkning. Vadden får en gelstruktur och fastnar därför inte i såret.

RÅD VID ANVÄNDNING

- **Vid näsblod** – för in vriden Stop Hémo i ren näsa. Nyp ihop näsborrarna under 10 min. Behåll Stop Hémo på plats under minst 30 min.
- **Tandborttagning/blödning i mun, läppar, tandkött eller tunga** – placera Stop Hémo på såret, ta bort när blödningsupphört. Kan användas tillsammans med lidokain-nafazolin.
- **Lokala sår** – rengör såret med tvål och vatten/koksaltlösning. Placera Stop Hémo på såret. Avlägsna när blödningsupphört eller lämna för läkning under 24 timmar. Eventuella kvarvarande fibrer från Stop Hémo tas bort smärtfritt med hjälp av koksaltlösning (natriumklorid 0,9 %) som möjliggör gelbildning.

KONTRAINDIKATIONER

Inga kända hittills.

VARNINGAR OCH FÖRSIKTIGHET

- Kontrollera att den sterila endospåsen är intakt före användning.
- Använd vadden i sin helhet. Klipp ej eller dra isär i bitar.
- Stop Hémo bör inte användas mer än 24 tim på samma ställe.
- Kasta använd produkt. Återanvänd inte.

INTERAKTIONER

Bör inte användas tillsammans med alkaliska lösningar som innehåller natriumhypoklorit, klorhexidin, bensalkoniumklorid eller kopparsalter. Om dessa har använts, skölj noggrant med en koksaltlösning innan Stop Hémo blodstillande vadd används på såret.

STERILISERING

Steril produkt, steriliserad med β -strålning. Återsterilisera inte.

FÖPACKNINGSPER INFORMATION

Steril vadd, 4 cm. 5 stycken i varje förpackning.

STRECKKOD OCH VARUNUMMER

Varunummer: 260794



**STERILT OCH
SMÄRTFRITT
FÖR VUXNA
OCH BARN**



LÄS MER PÅ WWW.NASBLOD.SE

**stop
hémo®**

Les Laboratoires Brothier, 41, Rue de Neuilly, 92735 Nanterre Cedex, Frankrike
www.nasblod.se, info@eternal.se